



PROGETTIAMO AUTONOMIA

Barbieri Srl

ISTRUZIONI per L'USO delle POSTURE

Queste istruzioni per l'uso si riferiscono alle posture "su misura" fornite dalla
Barbieri Srl - Via Nobel, 88 - 42100 Reggio Emilia - Italy

Contenendo tutte le indicazioni sull'uso corretto e sicuro del dispositivo, queste istruzioni devono essere accuratamente conservate dall'utilizzatore durante tutto il periodo del suo uso.

L'utilizzatore è tenuto a rispettare tutte le indicazioni e prescrizioni contenute in queste istruzioni.

1. Informazioni generali sul dispositivo

Le posture sono dispositivi medici destinati a prevenire, correggere o sostenere deformità o atteggiamenti patologici nella posizione seduta o sdraiata. In quanto tali, sono stati costruiti con l'accuratezza e l'esperienza pluriennale della Barbieri Srl, nel pieno rispetto :

- del Regolamento MDR 745/2017;
- del Decreto del Ministero della Sanità n° 332 del 27-09-1999.

2. Uso previsto del dispositivo

Trattandosi di "dispositivo su misura", deve essere utilizzato esclusivamente dalla persona indicata nella "Dichiarazione ai sensi dell'allegato XIII del Regolamento MDR 745/2017".

3. Identificazione del dispositivo

Il n° apposto nella parte inferiore della la postura (normalmente) identifica univocamente il dispositivo, in modo da poterlo associare con sicurezza alla persona per la quale è stato realizzato.

4. Avvertenze per l'uso

- Il dispositivo medico deve essere impiegato esclusivamente per la destinazione d'uso identificata dalla prescrizione medica.
- Questo dispositivo deve essere utilizzato esclusivamente con gli ausili per cui è stato progettato.
- La sudorazione corporea, le urine, le feci, la scialorrea, il vomito, il cibo e le bevande dei pasti, possono causare una alterazione delle caratteristiche dei materiali del dispositivo: oltre ad utilizzare le normali norme di igiene, è preferibile che venga utilizzato indossando indumenti
- Controllare periodicamente (almeno settimanalmente) il livello di pulizia del dispositivo (per prevenire lo sviluppo di flora batterica) e la sua funzionalità.
- La pulizia si effettua esclusivamente lavandolo con uno strofinaccio o una spazzola a setole morbide e acqua tiepida; l'asciugatura va effettuata con panni puliti ed una esposizione all'aria naturale per ottenere la sua essiccazione completa.
- Per lunghi periodi di non utilizzo, il dispositivo va pulito come sopra, e riposto in un ambiente pulito, non eccessivamente freddo/caldo o umido.
- I materiali utilizzati dalla Barbieri srl per la produzione di tali dispositivi sono stati valutati biocompatibili: qualora si dovessero verificare fenomeni di irritazione cutanea, allergie etc., gli interessati sono pregati di contattare immediatamente la Barbieri srl.
- Utilizzare le maniglie del dispositivo soltanto in assenza dell'utente all'interno
- Ogni tipologia di postura possiede almeno un sistema di fissaggio all'ausilio per la quale è stata realizzata: sul retro dello schienale (cintura e/o velcro e/o viti metalliche) e/o nella parte inferiore della seduta (solitamente velcro); prima di accomodare l'utente all'interno del dispositivo, è indispensabile accertarsi del corretto fissaggio di base e/o schienale della postura alle corrispondenti parti di seggiolone e/o passeggero e/o base per interni ecc.
- Le posture progettate per essere utilizzate sui seggioloni con sedile in legno, vengono fornite con una bandella adesiva in velcro da attaccare alla parte superiore della base del sedile: su tale bandella verrà fissata la corrispondente parte inferiore della postura. Per tutti gli altri sistemi di fissaggio seguire le istruzioni verbali impartite all'atto della consegna del dispositivo.



PROGETTIAMO AUTONOMIA

Barbieri Srl

- Controllare periodicamente (almeno 1 volta al mese) lo stato di usura del dispositivo

5. Uso scorretto o vietato

E' severamente vietato, per evitare danni alla salute della persona che lo adopera, utilizzare il dispositivo non seguendo tutte le avvertenze sopra indicate, in particolare;

- che venga utilizzato da persone diverse da quella per la quale è stato progettato e costruito;
- utilizzare questo dispositivo su ausili diversi da quelli per i quali è stato realizzato;
- che il dispositivo venga a contatto con pelle lesa o ferita del corpo;
- utilizzare solventi per la rimozione di macchie o sporczia eventualmente accumulatasi nel dispositivo;
- avvicinare il dispositivo a fiamme libere o fonti di calore eccessive (es, sigarette accese, stufe, ecc.) per evitare il danneggiamento o la combustione dei materiali costituenti il dispositivo;
- utilizzare le maniglie per spostare il dispositivo con il paziente al suo interno
- effettuare interventi di riparazione o manutenzione da personale non autorizzato dalla Barbieri Srl.

6. Controlli periodici del dispositivo e Garanzia

Qualora l'utente o la persona a lui di supporto verificasse o avesse sentore di possibili alterazioni dell'utente e/o della funzionalità del dispositivo medico, può richiedere immediatamente un controllo ed un eventuale intervento da parte di personale qualificato Barbieri Srl.

La Barbieri S.r.l. garantisce le posture per 12 mesi dalla data di consegna. Tale garanzia è valida ad esclusione dei casi in cui:

- il dispositivo venga modificato dal privato senza rivolgersi alla Barbieri Srl;
- il dispositivo subisca una modifica strutturale in seguito ad un urto accidentale;
- l'utilizzatore subisca modifiche anatomiche rilevanti

7. Istruzioni per la dismissione del dispositivo

Il dispositivo è fabbricato con materiali non biodegradabili, per cui la sua eliminazione va effettuata con i normali metodi di trattamento dei rifiuti domestici, senza disperderli nell'ambiente.

8. Modalità per la richiesta di controlli, riparazioni o reclami

Trattandosi di un dispositivo medico su misura, qualsiasi intervento di controllo o riparazione può essere effettuato solo da personale autorizzato dalla Barbieri Srl. Pertanto, qualsiasi reclamo o richiesta d'intervento sul dispositivo va fatto pervenire telefonicamente o per iscritto alla:

BARBIERI Srl - Via Nobel, 88 - 42100 Reggio Emilia - Italy -
Telefono: 0522-278888; Fax: 0522-278889
info@progettiamoautonomia.it

Nel caso di segnalazione di "incidenti gravi" contattare immediatamente Barbieri srl o l'autorità competente

SPIEGAZIONE DEI SIMBOLI SULL'ETICHETTA:

D.M. SU MISURA =DISPOSITIVO MEDICO SU MISURA